



Notice d'utilisation

"D-Mask MSK C.1.5"

Masque Grand Public - Catégorie 1 - Testé par l'IFTH

Rapport n° 2020-06-22-017-30

Filtration 97% - Respirabilité 306 L.m-2.s-1



D-Mask

Fabrication Française



- Nos masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires.
- Ils sont destinés à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.
- Nos masques sont adaptés à la crise sanitaire liée au COVID 19.
- Nos masques ne remplacent pas les gestes barrières. Ils ajoutent une barrière physique, à utiliser lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.
- Ce masque n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Avertissement

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Décompte d'utilisation

Nos masques peuvent être lavables 30 fois.

Ci-dessous veuillez renseigner le tableau en cochant les cases :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Masque 1																														
Masque 2																														
Masque 3																														
Masque 4																														
Masque 5																														
Masque 6																														
Masque 7																														
Masque 8																														
Masque 9																														
Masque 10																														

Comment mettre le masque :

- 01.** Lavez le masque avant de le porter la première fois.
- 02.** Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- 03.** Tenez le masque par les élastiques.
- 04.** Présentez le masque au niveau de la bouche.
- 05.** Insérez les élastiques derrière les oreilles.
- 06.** Ajustez en pinçant la barrette nasale avec vos mains pour l'ajuster correctement au niveau du nez.
- 07.** Abaissez le bas du masque sous le menton. Une fois ajusté, ne plus toucher votre masque avec les mains.
- 08.** Evitez de le toucher ou de le déplacer.

Comment enlever le masque :

- 01.** Changez votre masque après l'avoir porté 4h.
- 02.** Changez le pour boire ou manger.
- 03.** Changez le si, il devient difficile de respirer.
- 04.** Changez votre masque si, il est humide, endommagé ou déformé et si il ne tient plus correctement.
- 05.** Avant d'enlever un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution

hydroalcoolique.

- 06.** Débranchez les élastiques pour enlever le masque.
- 07.** En attendant de le laver, isolez-le dans un sac.
- 08.** Si votre masque est usé ou déformé, jetez-le immédiatement dans une poubelle.
- 09.** Pour finir, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Stockage des masques :

01. Les masques doivent être stockés dans un endroit propre et sec, dans leurs emballages, à l'abri de la lumière.

Lavages des masques :

- 01.** Pour rappel, après chaque utilisation les masques doivent être isolés, soit pour être jetés, soit pour être lavés.
- 02.** Isolez les masques dans des sacs plastiques ou sacs réutilisables à laver.
- 03.** Le masque a été testé pour 30 lavages. Après 30 lavages la filtration n'est plus garantie.
- 04.** Lavage en machine avec un produit lessive avec un cycle de 30 minutes à 60°.
- 05.** Pour le séchage, vous pouvez : Utiliser un sèche linge, ou laisser votre masque sécher à l'air libre.
- 06.** Repassez votre masque à la vapeur.

www.d-mask.fr

Solutio, 5 rue Henriot, 31100 Toulouse